

Gebrauchsanweisung Vollgesichtsmaske (Fullface)

Anlegen der Maske

Das wichtigste beim Anlegen unserer individuellen Beatmungsmaske:
Zuerst die Nasenstöpsel (Nasenöffnung in der Maske) von unten nach oben in die Nase reingleiten lassen. Die Maske solange am Gesicht andrücken bis sie das Kopfband um den Kopf gelegt haben und die unteren beiden Kopfbänder nach vorne gezogen haben um diese links und rechts am Kinn mit den weißen Clips an den vorhandenen Vorrichtungen zu befestigen.

Zum Öffnen und Schließen bitte nur die weißen Clips benutzen!

Bitte **nicht** die Klettverschlüsse zum Öffnen und Schließen nutzen!

Die Klettverschlüsse dienen nur zum strammer ziehen und nicht zum Lösen der Maske.

Zuletzt überprüfen Sie die Befestigung in der Liegeposition. Schalten Sie Ihr Gerät ein und ziehen ggf. die seitlichen Bänder in gleichem Verhältnis zueinander strammer, bis keine Luft mehr aus der Maske entweicht.

Da die Elastizität der Bänder nach längerem Gebrauch nachlässt, bestellen Sie bitte rechtzeitig Ersatz bei uns.

Ideale Kopfbandposition



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht jede Kopfform gleich ist. Die Bilder dienen nur zur Darstellung der idealen Kopfbandposition.

Reinigung der Maske (tägliche Reinigung)

Entfernen Sie zunächst den Schlauch von der Maske. Die Hartschalen sollten Sie nur gelegentlich entnehmen, um Feuchtigkeitsreste und Verunreinigungen zu beseitigen. Reinigen Sie Ihre Maske täglich mit warmen Wasser (max. bis 40°C), etwas handelsüblichem Spülmittel und einem weichen Baumwolltuch (kein Mikrofasertuch). Zum Schluss spülen Sie die Maske gut mit klarem Wasser ab. Das Kopfband kann als Handwäsche gereinigt werden, dabei ist darauf zu achten, die Klettverschlüsse geschlossen zu halten.

Hinweis: Die Steckverbindungen können zur Reinigung oder Reparatur zerlegt werden.

Grundreinigung/Desinfektion (ca. 1 x im Monat)

Unser Silikonreiniger kann als Tauchbad verwendet werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Wir bitten Sie, Ihre Maske nicht eigenmächtig nachzuarbeiten. In diesem Fall erlischt die Garantie. Scharfe oder spitze Gegenstände können zu Rissen und/oder Löchern führen, die Ihre Maske unbrauchbar machen können. Starkes Knicken schadet ebenfalls Ihrer Maske, da dies zu Bruchstellen führen kann.

Produktlebensdauer

Unsere Individualmasken sind auf eine Produktlebensdauer von ca. 2 Jahren ausgelegt. Im Laufe der Zeit können farbliche Veränderungen am Maskenmaterial auftreten, dies stellt keinen Qualitätsmangel dar.

Verordnungsdatum der aktuellen Maske:

Respirare Atemtechnik, Zechenstr. 6, 44581 Castrop-Rauxel
Tel.: 02305 – 9982277 Fax: 02305 – 9982278
teamcr@respirare.de